

心臟去纖維顫動器 4000
周年覆試評分指引

2002/09

評分細節	給分
甲部：心臟去纖維顫動器配件名稱 a) 考生能說出心臟去纖維顫動器一種配件名稱及位置 b) 考生能說出心臟去纖維顫動器二種配件名稱及位置 c) 考生能說出心臟去纖維顫動器三種配件名稱及位置 d) 考生能說出心臟去纖維顫動器四種配件名稱及位置 配件名稱：去纖電擊片密封包裝 / 電導片 / ECG 紙 / 電池 / 後備電池 / 記憶咭 / 模擬器 / 消毒抹紙	1 2 3 4
乙部：拆除及安裝配件 a) 考生能拆除及安裝一種配件 b) 考生能拆除及安裝二種配件 c) 考生能拆除及安裝三種配件 d) 考生純熟完成拆除及安裝三種配件 配件：ECG 紙卷 / 電池 / 記憶咭	1 2 3 4
丙部：接駁“測試器”進行測試 a) 考生能適當地接駁“測試器”及開動測試 Heartstart 4000 是否正常 (按下“Print Strip”制不放，再按“On”制) b) 考生從顯示器或 Printer 紙的列印，說出測試情況 --Passed 或 Failed，項目包括 i) 顯視的日期，時間 ii) 無“低電量”指示 iii) 無“需修理”指示	(每項 1 分計) 1 1 1 1
丁部：考生示範如何接上心臟去纖維顫動器及進行電擊 1) 考生貼上電擊片 除去患者(Annie)上衣 a) 貼上一片電擊片連電綫(位置正確) b) 貼上二片電擊片連電綫(位置正確) (注意：考生將電綫除下交給考官接駁至 tester,繼續進行下列考試) 考官將 tester 調校至 Sinus“正常竇性心律”模式 2) 考生能順利按 Heartstart 4000 “開關制(On)” 接上電源 考官將 tester 調校至(VF/VT) “心室纖維性顫動/過速”模式 3) 考生能順利按“分折制”，分折及充電， a) 考生祇望著机(Heartstart 4000)按分折制 b) 考生能視察患者,安全情況下才按分折制 4) 考生叫出“離開傷病者”(共二次,每次四分) a) 在第 3 項按分折制前,有叫出“離開傷病者” b) 在第 5 項按電擊制前, 有叫出“離開傷病者” 5) 考生進行電擊 a) 考生祇望著机(Heartstart 4000)按電擊制 b) 考生能視察患者(Annie),安全情況下才按電擊制	2 4 4 2 4 4 4 4 8
戊：考生自己按鈕進行下列操作 (注意：考官將 tester 調校至 Sinus“正常竇性心律”的模式) a) 按“畫面光暗鈕”上下，測試“光”及“暗” b) 按“喇叭鈕”上下,測試“大/細”心臟博動聲音 c) 按“心電圖(ECG)鈕”上下，放大/縮細心電圖像 d) 按“編印鈕(PRINT STRIP)”編印紀錄紙 及按制停止編印	(每項 2 分計) 2 2 2 2
限時 8 分鐘內完成(逾時會被停止考試) 考生未能於限時 8 分鐘內完成 考生於限時 8 分鐘內完成	0 2